

ULTRADENT®
PRODUCTS, INC.

Gerum góðar lýsingarskinnur.



Hreinsið tennurnar vel, takið alginate mát, steypið í það og trimmið.



Notið **Block Out Resin** til að móta pláss svo nægilegt magn af lýsingargeli sitji á réttum stöðum á tönnunum.



Notið **Sof-Tray** acryl plötu til að útbúa skinnu sem situr þægilega. Hitið efnið og mótið í Vacuumformer.



UP0226 skinnuefnið frá Ultradent er 0,9mm þykkt, mjög sveigjanlegt og hentar vel í lýsingarskinnur.



Þegar platan hefur kólnað notið þá **UP0604 Utility Vinyl Cutters** til að grófklippa skinnuefnið.



Notið **UP0605 Ultra-Trim Scalloping** skæri til að fínklippa kanta og brúnir. Skinnan ætti að ná upp undir tannholdsbrún en má ekki ná upp á tannholdið.



Setjið skinnuna aftur á módelið. Athugið hvort brúnirnar gapa, ef þörf er á hitið þá lítillega og þrýstið niður með rökum fingri.



Nú er lýsingarskinnan tilbúin, brúnir vel og nákvæmlega klipptar og skinnan tilbúin til loka mátunar.

 **HENRY SCHEIN FIDES**

Sími: 588 8999 - Fax: 588 9975 Netfang: henry.schein.fides@hsfides.is